



THERMO ALKA CLEAR

- ✓ schwach alkalisch eingestellt
- ✓ mit speziellen Enthärtungskomponenten

Spezialklarspüler für
thermische Steckbeckenautomaten

- schützt Steckbeckenspülen vor Verkalkung
- gewährleistet eine fleckenfreie Trocknung des Spülguts
- extrem schaumarm eingestellt



CE

PRÄPARATETYP

THERMO ALKA CLEAR ist geeignet zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbeckenspülen der Firmen Arjo, Getinge, ZK Kulimat sowie Kodra. Es gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülguts, reduziert eine Verkalkung der Steckbeckenspülen und ist extrem schaumarm eingestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

THERMO ALKA CLEAR ist zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken der Firma Arjo, Getinge, ZK Kulimat sowie Kodra geeignet.

THERMO ALKA CLEAR reduziert die Verkalkung von Steckbeckenspülen.

Nicht anwenden für nicht-thermische Steckbeckenspülen.

ANWENDUNG

Materialien entsprechend den Empfehlungen (z.B. Hygieneplan) in die Maschine einlegen. Sämtliche zu reinigende, bzw. zu desinfizierende Oberflächen und Hohlräume müssen für die maschinelle Aufbereitung zugänglich sein. **THERMO ALKA CLEAR** zum Nachspülen entsprechend den Vorschriften der Automatenhersteller einfüllen.

Hinweis (bei Programmeinstellung beachten):
Zudosierung erst ab 30 °C.

DOSIERUNG

Je nach Automatentyp und Wasserhärte: 1,0 - 4,5 ml/l
(siehe Herstellerangaben) (ca. 0,10 - 0,45 %)

Dosierung durch Fachpersonal durchführen!

ZUSAMMENSETZUNG

Dimethylol Glycol, Dimethylol Urea,
Methylchloroisothiazolinon, Methylisothiazolinon,
Polycarboxylate 15 - 30%

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen des Konzentrates: grüne Lösung
pH-Wert, Konzentrat: ca. 9,0
Dichte (20 °C): ca. 1,17 g/ml

LIEFERFORMEN

| Einzelpackung | Verkaufseinheit | PZN | Art.-Nr. |
|-----------------|-----------------|-----|------------|
| 4,25 L Kanister | 3 x 4,25 Liter | - | 00-137-050 |

DOSIERHILFEN

Kanisterumfüllhahn, Dosierpumpen für Kanister,
Kanisterschlüssel.

BESONDERE HINWEISE

Es ist zu empfehlen, alle 6 Monate eine Grundreinigung mit einem kalklösenden Reiniger, wie z.B. **THERMOTON N** durchzuführen, um evtl. entstandene Kalkablagerungen zu entfernen. Nach dieser manuellen Reinigung sind die Steckbeckenspülen zweimal maschinell mit Wasser nachzuspülen.
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PRODUKTSTATUS

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

