



## Manuelle Desinfektion & Reinigung

# ORANGE SOLVENT

## Spezialreiniger für die Flächenreinigung von Medizinprodukten

- Aus natürlichem Orangenöl
- Mit besonderer Reinigungskraft
- Entfernt mühelos klebrige Rückstände und Markierungen



### Produktbeschreibung

ORANGE SOLVENT ist eine gebrauchsfertige Reinigungslösung zur gründlichen Entfernung von hartnäckigen Rückständen auf medizinischen Instrumenten und Inventar. Auch zur Entfernung von Kleberesten, Permanentmarkern, sowie Streifen auf Fußböden. Sparsam in der Anwendung.

### Anwendungsgebiete

Leichtes Ablösen von lästigen Aufklebern und alten Etiketten nach kurzer Einwirkzeit und leichte Entfernung der Klebereste.

- Für die weitgehende Entfernung von Jodflecken und anderen Farbsignalflecken.
- Zum Entfernen von lästigen Streifen und Striemen auf PVC- und Linoleum-Böden wie sie z.B. von Bettenrollen verursacht werden.
- Löst ölige Flecken aus Kleidung, Teppichen und Polstern.

### Anwendung

ORANGE SOLVENT auf ein Wischtuch oder Einwegtuch geben und die zu behandelnden Flächen einreiben.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Zusammensetzung

Citrus Sinensis Peel Extract, Limonene, Decyl Oleate.

### Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von ORANGE SOLVENT wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA). Die Anwendung von ORANGE SOLVENT ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyoximethylen (POM).

### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Fachkunde gem. nationaler Richtlinien. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
ORANGE SOLVENT	Flasche	250ml	9	00-805-0025	00792320
	Flasche	500ml	6	00-805-005	00792337

